

CryoPro:

криотерапия, криопилинг, криомассаж

Среди способов применения жидкого азота в мировой дерматологии и косметологии далеко не последнее место занимают такие методы криотерапии, как криопилинг и криомассаж.

Криопилинг

Криопилингом называют процедуру, при которой на кожу воздействуют мягкой струей жидкого азота, вызывая естественное по своему характеру отмирание клеток самого верхнего слоя эпидермиса. Таким образом достигается эффект, сравнимый с действием кислотных криопилингов, но без каких бы то ни было аллергических явлений. 10-15-секундное воздействие струи жидкого азота вызывает сужение капилляров кожи, а затем они расширяются, что приводит к усилению кровообращения и улучшению внешнего вида кожного покрова. При 30-секундном воздействии жидкого азота наступает естественный апоптоз клеток, аналогичный тому, который происходит при лёгких обморожениях. Отмирание старых клеток стимулирует образование новых, молодых и здоровых клеток. При этом активизируются также процессы выработки коллагеновых и эластиновых волокон.



Криопилинг при себорее

Показания для проведения криопилинга лица:

- необходимость очищения и стимуляции кожи;
- наличие мелких и средних по величине морщин;
- угревая болезнь (акне);
- расширенные поры;
- пигментные пятна;
- кожа имеет неровный, бугристый вид;
- кожа вялая, снижен тургор кожи;
- тусклый, нездоровый цвет кожных покровов;
- небольшие дефекты кожи лица: рубцы, шрамы, следы от прыщей.



Местный криопилинг



Наконечник для лечения акне OS SOFT

Предназначен для криотерапии акне, имеет 9 расположенных в один ряд отверстий диаметром 0,22 мм и производит плоскую струю жидкого азота высокой дисперсности и мягкого воздействия. Позволяет нежно отшелушивать поверхностный слой кожи, производит иммуностимулирующее действие, поэтому используется также для криопилинга и криомассажа.

Криомассаж

Криомассаж относится к иммуностимулирующим и омолаживающим процедурам в дерматокосметологии. Это более лёгкое и общее воздействие на кожу холодом, чем при криопилинге. Криомассаж не преследует цели отшелушивания верхнего слоя эпидермиса. Его задача – оказать иммуностимулирующее, метаболическое, закаливающее и омолаживающее действие.



Криомассаж лица

Показания к применению криомассажа:

- омоложение кожи, вялость, профилактика её старения;
- нездоровый цвет кожи, синяки, мешки под глазами;
- повышенная пигментация;
- отёчность;
- реабилитация после пластической операции;
- жирная кожа, чёрные точки, расширенные поры;
- угревая сыпь, рубцы после неё;
- розацеа, демодекоз, купероз, атопический дерматит;
- облысение;
- болезни кожи головы — себорея, перхоть;
- ослабленные волосы.

Крио-орошение лица

Эта микро-процедура может быть дополнительной к другим процедурам. Её цель – освежить лицо, дать пациенту почувствовать несколько минут приятного свежего бриза и улучшить его настроение в завершение других процедур, которые могли быть утомительны.



Крио-орошение лица

Примеры выручки:

Криопилинг

Пример выручки в месяц, руб.	700 руб. x 10 процедур x 22 раб. дня = 154 000 руб.
------------------------------	--

Криомассаж

Пример выручки в месяц, руб.	700 руб. x 10 процедур x 22 раб. дня = 154 000 руб.
------------------------------	--

Крио-орошение лица

Пример выручки в месяц, руб.	700 руб. x 10 процедур x 22 раб. дня = 154 000 руб.
------------------------------	--

Полезные ссылки:

Техника проведения криомассажа методом открытого спрея: книга "Успешная дерматологическая практика", Изд-во "Гэотар-Медиа", Москва, 2019 г. Авторы: Анна Карпова и др. https://disk.yandex.ru/i/H2DyRXcmg_EshA

Криомассаж волосистой части головы: книга "Успешная дерматологическая практика", Изд-во "Гэотар-Медиа", Москва, 2019 г. Авторы: Анна Карпова и др. https://disk.yandex.ru/i/H2DyRXcmg_EshA

Публикации на сайте CryoPro:

<http://cryopro.ru/public/publications.html>